





b.) tai etujalkaan olkapään alapuolelle

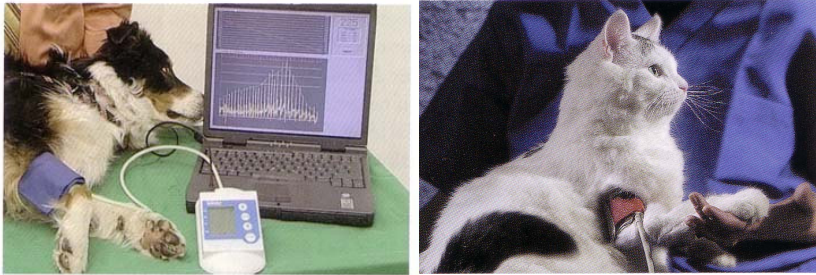

8. Valitse oikea mansetti:
  - i. Koira 10-20 kg : sininen mansetti, pieni (D1)
  - ii. Koira yli 20 kg: sininen mansetti, suuri (D2)
  - iii. Kissa ja pieni koira: punainen mansetti (C1)


Mansetti tulee kiinnittää napakasti, mutta ei liian tiukkaan. Naisilla mansetin sisään tulisi mahtua pikkurilli.

9. Kiinnitä (paina) mansetti laitteeseen (takana keskellä).

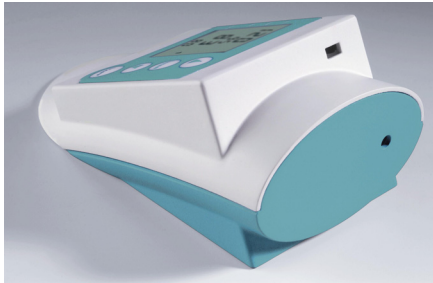

10. Jos on mahdollista käyttää avustajaa / omistajaa apuna, pyydä häntä pitämään eläin rauhallisena esimerkiksi silittämällä ja rauhoittamalla puheella. Mittauksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että potilas on mahdollisimman rento ja rauhallinen.
11. Paina START. Nyt tietokoneen näytön USB symboli tulee vaaleaksi, tästä tiedät että verenpainelaitteen ja tietokoneen välillä on toimiva yhteys.
12. Laite tarjoaa automaattisesti C1 mansettia (kissa, punainen). Jos haluat tämän mansetin, paina ENTER. Huom! Mittauksen luotettavuuden kannalta on tärkeää että valitset oikean kokoisen mansetin.

13. Jos haluat vaihtaa mansetin / sinulla ei ole käytössä C1-mansettia, vaan esimerkiksi D2 (koira yli 11 kg), paina C1:den vilkkuessa ylänuolta kunnes valikkoon tulee D2 ja tämän jälkeen paina ENTER.
14. Kun sinulla on oikea mansetti valittuna koneesta, paina START. MD-verenpainemittari automaattisesti mittaa Systolisen ja diastolisen paineen, sekä keskipaineen ja pulssin. Näet ne laitteen mitattua näytöllä.
15. Samaan aikaan näet mittauksen graaffin tietokoneesi näytöllä.

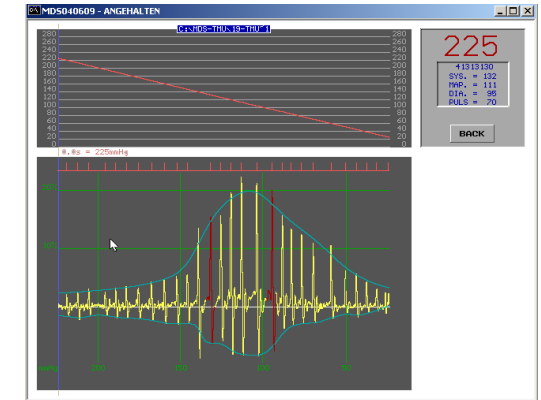

16. Mikäli laite ei lähde mittaamaan ja näyttää alareunassa E 6 (ERROR 6) tarkista, että mansetti on sopivan napakasti ja oikeassa paikassa. E2 (ERROR 2) tarkoittaa että mitattaessa on ollut liikaa artefakteja esim. eläimen liikkumisesta johtuen.
17. On suositeltavaa ottaa ainakin kolme mittausta jotta mittauksen luotettavuus varmistetaan. Jos mittauksissa on yli 15 % heitto toisiinsa nähden, kannattaa mittauksia tehdä 5. Voit tehdä mittaukset tässä vaiheessa painamalla START näppäintä aina kun haluat ottaa uuden mittauksen. Näytön alareunasta näet montako mittausta on tehty.
18. Näistä keskiarvon saat painamalla ENTER ja nuolta ylöspäin kunnes tulee FA (FUNCTION AVERAGE) ja ENTER. Nyt näytöllä vilkkuu valitsemasi mittaus-määrän keskiarvo (suositeltua käyttää 3-5 mittausta).